

Be Brilliant™



Rengøring af Signia RIC høreapparater



signia

Høreapparat (modelnavn) _____

Højttaler (styrke og længde) _____

Eartip 3.0 Open Eartip 3.0 Tulip

Sleeve 3.0 Earmould 3.0 RIC

Høreapparatets dele^{*}

- 1 Øreprop
- 2 Højtaler
- 3 Højtalerforbindelse
- 4 Mikrofonåbninger
- 5 Vippeomskifter
- 6 Batterikammer



* Kan variere afhængig af model

Dry&Clean opladere

Dry&Clean-opladeren er det ultimative inden for avanceret teknologi til opladning, og den oplader ikke kun høreapparaterne, den byder også på teknologi til UVC-rengøring og -tørring, så høreapparaterne altid er i topform.

UVC-rengøringen starter automatisk, når høreapparaterne sættes, og den fuldføres på kun 15 minutter.

Spørgsmål og svar

Hvor ofte skal jeg skifte Eartip 3.0/ Sleeve 3.0?

Det er meget individuelt, men ca. en gang i kvartalet.

Hvor ofte skal jeg skifte filteret?

Det er meget individuelt, men ca. en gang i kvartalet. Hvis Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 tørres af dagligt, så kan det gøres sjældnere.

Rengøring af Earmould 3.0 – lang øreprop

Rengør ørepropperne dagligt med en blød, tør klud. Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer og bliver hård.

Hvis der er behov for grundigere rengøring er det nødvendigt at afmontere Earmould 3.0 øreproppen fra højttaleren:

Med Tool Removal 3.0 (til lange ørepropper):

Fjern først WaxGuard 3.0 filteret som vist andetsteds i denne guide. Derefter anvendes værktøjet Tool Removal 3.0 til at trække højttaleren ud.



Rengør derefter øreproppen med lunkent vand med en dråbe opvaskemiddel i. Skyl grundigt og lad øreproppen tørre helt.



Sæt den rengjorte Earmould 3.0 på plads på højttaleren igen.

Sæt derefter et nyt WaxGuard 3.0 filter i øreproppen som vist andetsteds i denne guide.

Rengøring af Earmould 3.0 – kort øreprop

Rengør ørepropperne dagligt med en blød, tør klud. Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer og bliver hård.


Hvis der er behov for grundigere rengøring er det nødvendigt at afmontere Earmould 3.0 øreproppen fra højttaleren:

Med Tool Handling 3.0 (til kortere ørepropper):

Fjern først WaxGuard 3.0 filteret som vist andetsteds i denne guide. Derefter anvendes værktøjet Tool Handling 3.0 til at skubbe højttaleren ud.



Rengør derefter øreproppen med lunkent vand med en dråbe opvaskemiddel i. Skyl grundigt og lad øreproppen tørre helt.

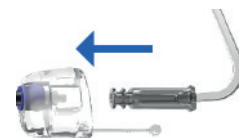

Sæt den rengjorte Earmould 3.0 på plads på højttaleren igen.

Sæt derefter et nyt WaxGuard 3.0 filter i øreproppen som vist andetsteds i denne guide.

UDSKIFTNING AF EARTIP 3.0 / SLEEVE 3.0

Udskift Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 ca. hver 3. måned. Udskift dem tidligere, hvis de får revner eller andre forandringer.

Sådan fjerner du Eartip 3.0 / Sleeve 3.0


Følg illustrationen nedenfor for at afmontere den gamle Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0. Pas på ikke at trække i højttalerforbindelsen.



Sådan monterer du en ny Eartip 3.0 / Sleeve 3.0

Vær særligt omhyggelig med, at den nye Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0 dækker fastholdelsesringene på højttaleren helt.

Kontrollér, at den nye Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0 sidder sikkert fast.

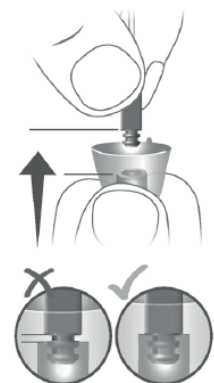


Udskiftning af filter i højttaleren

Når du udskifter din Eartip 3.0 / Sleeve 3.0, anbefaler vi, at du samtidig skifter filteret. Hvis lyden i høreapparatet begynder at blive svagere, kan det skyldes et tilstoppet filter.

Når du har fjernet din Eartip 3.0 / Sleeve 3.0, kan du se et lille hvidt filter i højttaleren. Det er filteret, som du skal skifte!

WaxGuard 3.0 filter har varenr. 1099 3649.

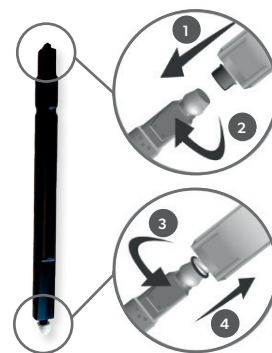

Sådan fjerner du filteret

- 1 Anvend den sorte ende af voksfilterpinden som værktøj til at løsne det gamle filter.
- 2 Placer enden mod filteret i højttaleren, og skru med uret. Træk derefter filteret ud af højttaleren. Dette filter skal kasseres!


Monter et nyt filter

- 3 Anvend voksfilterpindens modsatte ende, hvor du ser et nyt filter, og placer dette i højttaleren.
- 4 Placer filteret ved at trykke det på plads inde i højttaleren.

Udskiftning af filter på Earmould 3.0

Når du skal skifte filter på din Earmould 3.0, skal du anvende WaxGuard 3.0 filteret til at fjerne det gamle filter og placere et nyt.

WaxGuard 3.0 filter har varenr. 1099 3649.

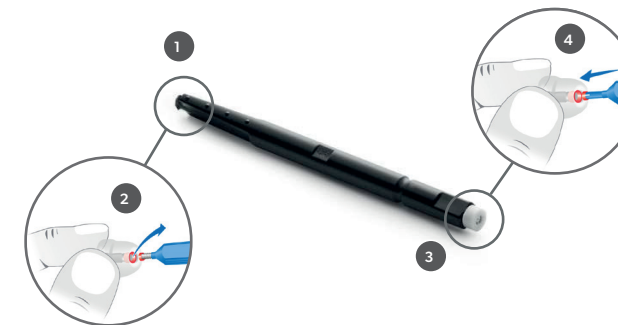

Sådan fjerner du filteret

- 1 Anvend den tomme ende af voksfilterpinden som værktøj til at løsne det gamle filter.
- 2 Placer enden mod filteret i Earmould 3.0, og tryk ind. Træk herefter filteret ud af Earmould 3.0. Dette filter skal kasseres!

Monter et nyt filter

- 3 Anvend voksfilterpindens modsatte ende, hvor du ser et nyt filter, og placer dette i Earmould 3.0.
- 4 Placer filteret ved at trykke det på plads inde i Earmould 3.0.



BEMÆRK: Du behøver ikke at løsne højttaleren for at skifte filter på din Earmould 3.0.

Støttevinge (Concha-lock 3.0)

Der kan være behov for en støttevinge for at høreapparaterne sidder bedre fast. Støttevingen er et tilvalg som ikke alle har behov for. Støttevingen bør kun bruges sammen med Eartip 3.0 / Sleeve 3.0.

Støttevingen har varenummer 10993677.

Sådan monterer du støttevingen



Det er ikke nødvendigt at fjerne Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 for at sætte støttevingen på.

- 1 Sæt støttevingen på. Den skal pege fremad som vist på billedet. Der lyder et svagt klik når støttevingen er på plads.

Onlinebestilling

Du kan bestille Eartips 3.0 / Sleeves 3.0, filtre m.m. på vores hjemmeside.

www.signia.net/da-dk/bestilling-forbrugsdele/

Filter og tilbehør

- Tool Handling 3.0, varenr. 10969958
- Tool Removal 3.0, varenr 10967340
- Waxguard 3.0 filter, varenr. 10993649
- Støttevinge (Concha-lock), varenr. 10993667

Din høreklunik

Juridisk producent

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngbe
Denmark

2205-1-S-DK-90008 | © 02.2022 WSAUD A/S

Se mere her:



signia.net



Signia Hearing



Signia Hearing



Signia Hearing