

# Be Brilliant™



## Rengjøring av Signia RIC høreapparater

EarWear 3.0



**signia**

Høreapparat (modellnavn) \_\_\_\_\_

Høytaler (styrke og lengde) \_\_\_\_\_

Eartip 3.0 Open     Eartip 3.0 Tulip

Sleeve 3.0     Earmould 3.0 RIC

# Høreapparatdeler \*

- 1 Ørepropp
- 2 Høytaler
- 3 Høytalertilkobling
- 4 Mikrofonåpninger
- 5 Vippebryter
- 6 Batteriluke



\* Kan variere avhengig av modell

## Dry&Clean ladere

Dry&Clean-laderen er det ultimative innenfor avansert teknologi til oppladning, og den lader ikke kun høreapparatene, den byr også på teknologi til UVC-rengjøring og -tørking, så høreapparatene alltid er i toppform.

UVC-rengjøringen starter automatisk, når høreapparatene settes i, og den fullføres på kun 15 minutter.



Scan og  
lære mer

## Online bestilling

Du kan bestille Eartips 3.0 / Sleeves 3.0, filtre mm. på vår hjemmeside

Scan og  
bestill direkte  
i vår nettbutikk



# Rengjøring av Earmould 3.0 – lang ørepropp

Rengjør øreproppene daglig med en myk, tørr klut. Dette vil hindre at ørevoksen tørker ut og blir hard.

Hvis det er behov for mer grundig rengjøring er det nødvendig å fjerne Earmould 3.0 øreproppen fra høyttaleren:

Med Removal Tool 3.0 (for lange ørepropper):

Fjern først WaxGuard 3.0-filteret som vist et annet sted i denne veiledningen. Deretter brukes Tool Handling 3.0-verktøyet for å skyve høyttaleren ut.



Rengjør deretter øreproppen med lunkent vann med en dråpe oppvaskmiddel i. Skyll grundig og la øreproppen tørke helt.



Plasser den rengjorte Earmould 3.0 på høyttaleren.

Sett deretter inn et nytt WaxGuard 3.0-filter i øreproppen som vist andre steder i denne veiledningen.

# Rengjøring av Earmould 3.0 – kort ørepropp

Rengjør øreproppene daglig med en myk, tørr klut. Dette vil hindre at ørevoksen tørker ut og blir hard.

Hvis det er behov for mer grundig rengjøring er det nødvendig å fjerne Earmould 3.0 øreproppen fra høyttaleren:

Med Handling Tool 3.0 (for kortere ørepropper):

Fjern først WaxGuard 3.0-filteret som vist et annet sted i denne veiledningen. Deretter brukes Tool Handling 3.0-verktøyet for å skyve høyttaleren ut.



Rengjør deretter øreproppen med lunkent vann med en dråpe oppvaskmiddel i. Skyll grundig og la øreproppen tørke helt.



Plasser den rengjorte Earmould 3.0 på høyttaleren.

Sett deretter inn et nytt WaxGuard 3.0-filter i øreproppen som vist andre steder i denne veiledningen.

# Utskifting av Eartip 3.0/Sleeve 3.0

Bytt ut Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 ca. hver måned. Bytt dem tidligere hvis de får sprekker eller andre endringer.

## Slik fjerner du Eartip 3.0 / Sleeve 3.0


Følg illustrasjonen nedenfor for å demontere den gamle Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0. Vær forsiktig så du ikke knekker høyttalertilkoblingen.



## Slik monterer du en ny Eartip 3.0 / Sleeve 3.0

Påse at den nye Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0 dekker festeringene på høyttaleren helt.

Sjekk at den nye Eartip 3.0 eller Sleeve 3.0 er godt festet.

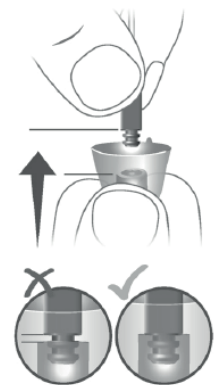


# Utskifting av filter i høyttaleren

Når du bytter ut Eartip 3.0 / Sleeve 3.0, anbefaler vi at du samtidig skifter filteret. Hvis lyden i høreapparatet begynner å bli svakere, kan det skyldes et tett filter.

Etter at du har fjernet Eartip 3.0 / Sleeve 3.0, kan du se et lite hvitt filter i høyttaleren. Dette er filteret du må bytte!

WaxGuard 3.0 filter har varenr. 1099 3649

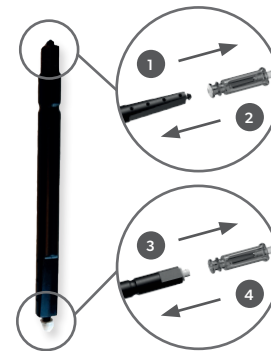

## Slik fjerner du filteret

- 1 Bruk den svarte enden av voksfilterpinnen som et verktøy for å løsne det gamle filteret.
- 2 Plasser enden mot filteret i høyttaleren og vri med klokken. Trekk deretter filteret ut av høyttaleren. Dette filteret må kasseres!


## Installer et nytt filter

- 3 Bruk den motsatte enden av voksfilterpinnen der du ser et nytt filter og plasser dette i høyttaleren.
- 4 Plasser filteret ved å skyve det på plass inn i høyttaleren.

# Utskifting av filter på Earmould 3.0

Når du trenger å bytte filter på Earmould 3.0, må du bruke WaxGuard 3.0-filter for å fjerne det gamle filteret og plassere det en ny.

WaxGuard 3.0 filter har varenr. 1099 3649

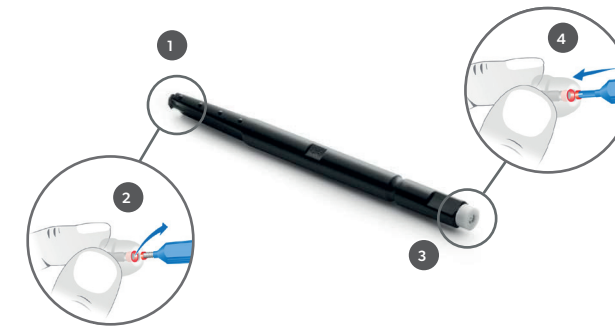

## Slik fjerner du filteret

- 1 Bruk den tomme enden av voksfilterpinnen som et verktøy for å løsne det gamle filteret.
- 2 Plasser enden mot filteret i Earmould 3.0 og trykk inn. Trekk deretter filteret ut av Earmould 3.0. Dette filteret må kasseres!

## Installer et nytt filter

- 3 Bruk den motsatte enden av voksfilterpinnen der du ser et nytt filter og plasser dette i Earmould 3.0
- 4 Plasser filteret ved å skyve det på plass inn i Earmould 3.0.



MERK: Du trenger ikke å frigjøre høyttaleren fra høreapparatet for å bytte filter på Earmould 3.0.

# Støttevinge (Concha-lock 3.0)

En støttevinge kan være nødvendig for at høreapparatene skal sitte bedre på plass. Støttevingen er et alternativ som ikke alle trenger. Støttevingen skal kun brukes med Eartip 3.0 / Sleeve 3.0

Støttevingen har varenummer 10993677.

## Slik monterer du støttevingen



Det er ikke nødvendig å fjerne Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 for å sette støttevingen på.

- 1 Fest støttevingen. Den skal peke fremover som vist på bildet. Det er et svakt klikk når støttevingen er på plass.

# Spørsmål og svar

## Hvor ofte bør jeg bytte Eartip 3.0 / Sleeve 3.0?

Det er veldig individuelt, men ca. en gang månedlig.

## Hvor ofte bør jeg bytte filter?

Det er veldig individuelt, men ca. en gang i måneden. Hvis Eartip 3.0 / Sleeve 3.0 tørkes av daglig, kan den byttes sjeldnere.

# Filter og tilbehør

- Handling Tool 3.0, varenr. 10969958
- Removal Tool 3.0, varenr 10967340
- Waxguard 3.0 filter, varenr. 10993649
- Støttevinge (Concha-lock), varenr. 10993667

Din hørselsklinikk

## Lokal kontaktinformasjon

Sivantos AS  
Lakkegata 53  
0187 Oslo

2208-1-S-NO-90024 | ©02.2022 WSAUD A/S

Se mere her:



signia.net



Signia Hearing



Signia Hearing



Signia Hearing