

Quick Start Guide


Signia TV Sound

Stream TV-lyd i høj kvalitet direkte til dine Bluetooth®-kompatible Signia høreapparater



Sådan tænder du for din TV Sound


1. Brug det medfølgende Micro USB-kabel.
2. Tilslut kablet til TV Sound-enheden.
3. Tilslut derefter den anden ende af kablet til TV'ets USB-port.
4. TV'et skal være tændt, for at enheden fungerer korrekt.

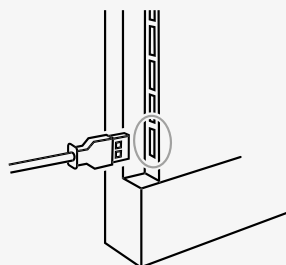

Tilslutning af lydindgang


Via analogt kabel

1. Tilslut TV Sound til strømforsyningen.
2. Tilslut det analoge kabel til det lille stik bag på TV Sound.
3. Tilslut den anden ende af kablet til de tilsvarende lydudgange på dit TV.
4. Tænd for TV'et for at starte lyden.

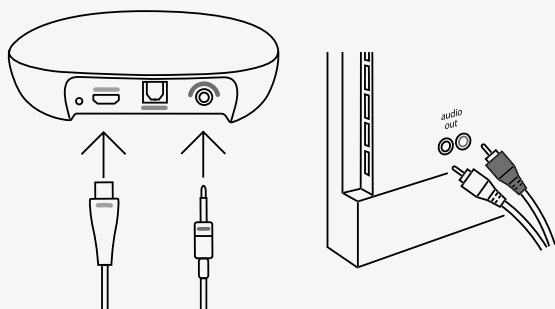

Via optisk kabel

1. Tilslut TV Sound til strømforsyningen.
2. Tilslut det optiske kabel til det blå stik bag på TV Sound.
3. Tilslut den anden ende af det optiske kabel til "Optical OUT"-udgangen på dit TV.
4. Tænd for TV'et for at starte lyden.

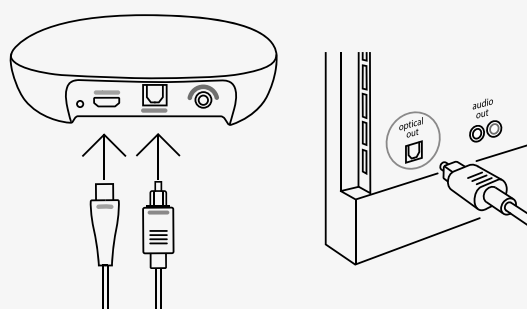

Quick Start Guide

Signia TV Sound

Tilslut dine høreapparater med TV Sound

1. Tænd for TV Sound. Husk TV Sound skal være tilsuttet TV'et for at kunne tænde.
2. Genstart dine høreapparater (Sluk og tænd for dem).
3. Placer høreapparaterne inden for 0–20 cm fra enheden:

- LED-lampen vil blinke blåt under tilslutningen.
- LED-lampen lyser konstant blåt, når tilslutningen er gennemført.

TIP: Hvis dine høreapparater allerede er tilsluttet/parret med en anden enhed (fx en mobil), bør du slukke for Bluetooth på denne enhed under tilslutningen med TV Sound.



Start streaming med Signia appen

Trin 1:

- Åbn Signia appen
- Tryk på 'Stream' nederst på skærmen

Trin 2:

- Tryk på Afspil for at starte streaming af TV-lyden

Trin 3:

- Juster lydstyrken efter behov
- Tryk på Pause for at stoppe streaming

